



Инфильтрация материалом Icon smooth surface: микроинвазивный метод с широким спектром показаний к применению



Подробная информация о диагностике и лечении находится на следующей странице на www.dmg-dental.com/icon-vestibular

Валлекс М

Официальный дистрибьютор в России - ООО «ВАЛЛЕКС М»
Юр. адрес: 117630, Москва, Старокалужское ш., д. 62, эт. 3, пом. I, ком 60
Факт. адрес: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1
тел.: +7 (495) 784-71-24; e-mail: stom@vallexm.ru
www.vallexm.ru, www.vallexm-stom.ru, www.dmg-dental.com



DMG

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

Белые пятна Флюороз Травма МРГ*

Диагностика глубины пятна

Поверхностное поражение

Смешанное поражение

Глубокое поражение

Отбеливание (при необходимости)

Ждем 2 недели

14

Раббердам/ Жидкий коффердам

Микроабразия (опционально)

Пескоструйная обработка/ Микроабразия

Алмазный бор

Icon-Etch



2 мин.

Повторить

Пятна стали менее заметны

Icon-Dry



30 сек.

Пятна все еще видны



≥ 3 мин.

Icon-Infiltrant

Фотополимеризация



40 сек.



40 сек.

Фотополимеризация

Icon-Infiltrant



1 мин.

Добавить композит (опционально)

Полировка